



ИНСТРУКЦИЯ:

1. Очистите пораженный участок и промокните марлей излишки воды.
2. Снимите защитную пленку с пластыря.
3. Слегка прижмите пластырь и держите 20-30 сек., пока он не приклеится
4. По окончании действия активных компонентов защитный слой растворяется

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не удалять пластырь до его растворения, можно повредить слизистую полость рта
- Изделие предназначено для одноразового использования.
- При повторном применении может вызвать инфицирование, перекрестную инфекцию и воспалительный процесс.
- Не используйте, если упаковка изделия повреждена или загрязнена.
- Не используйте на глубоких ранах с чрезмерным кровотечением.
- Наносите продукт после остановки кровотечения.
- Уделите особое внимание удалению пластыря перед сном и в случае использования изделия у детей

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА